




Evaluation subjective d'Absolue

Cette évaluation a été menée par 16 ophtalmologistes auprès de 124 porteurs (247 yeux), elle portait sur trois critères, le confort de vision, le confort de port et le confort global, après un mois de port.

Matériel et méthode

Lors de la consultation les médecins devaient remplir une fiche d'évaluation pour chaque patient en renseignant : une des tranches d'âge proposées 18-25 ans / 26-35 ans ou >35 ans, le statut Femme/Homme, la qualité de nouveau porteur ou ancien porteur (type de lentilles portées) et la puissance de la lentille Absolue essayée. Après le contrôle à un mois de port les médecins demandaient aux patients d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 (5 correspondant à un résultat excellent) leur confort visuel, leur confort de port et leur confort global. Les patients étaient majoritairement des femmes plus de 66%, la tranche d'âge des 18-25 ans était la plus représentée avec une répartition égale entre les femmes et les hommes. 62% des lentilles Absolue essayées avaient une puissance comprise entre -0.50 et -3.00, 13 % entre +0.50 à +5.75 et 25% entre -3.25 et -10.00

55% des patients étaient déjà porteurs de lentilles (32% en Silicone Hydrogel et 23% en Hydrogel). (Fig 1)

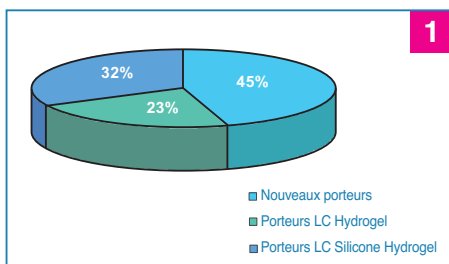

Résultats

Les résultats récoltés sont présentés pour chacun des trois groupes : nouveaux porteurs, porteurs de lentille en hydrogel et porteurs de lentilles en Silicone Hydrogel. En ordonnée l'échelle de 1 à 5 (5 note maximale) et en abscisse le nombre de patients

Confort visuel

73 % des nouveaux porteurs ont évalué le confort de vision à 5, ils représentaient 68 % dans le groupe des anciens porteurs de lentille en Silicone Hydrogel et 61% pour celui des anciens porteurs de lentilles en Hydrogel. (Fig 2 - 3- 4)

Confort de port

La notation de 5 pour le confort de port a été choisie par 75 % des nouveaux porteurs et respectivement par 60% et 54% de ceux déjà équipés en SiHy et en hydrogel. (Fig 2 - 3- 4)

Confort global

Le confort global de la lentille Absolue a été évalué à 5 par 75% des nouveaux porteurs, par 63% des patients déjà équipés en SiHy et par 60% de ceux portant des lentilles hydrogel. (Fig 2 - 3- 4)

Pour les trois groupes confondus, **Absolue s'est vue attribuée la notation maximale (5) par 81 patients (65%) pour le confort de port et par 85 patients (68%) pour le confort de vision et le confort global.** (Fig 5)

