

C&F V2

Importer sa topographie



OPD Scan NIDEK : Création du raccourci sur votre bureau


Nous vous conseillons de créer un dossier sur votre bureau pour y enregistrer l'export des topographies.

Dans l'OPD Scan dans MAIN MENU cliquer sur SETTINGS puis sur DATA OUTPUT

Dans Save Folder renseigner le chemin ou enregistrer l'export des topographies



OPD Scan NIDEK

Voici les paramétrages dont vous aurez besoin :

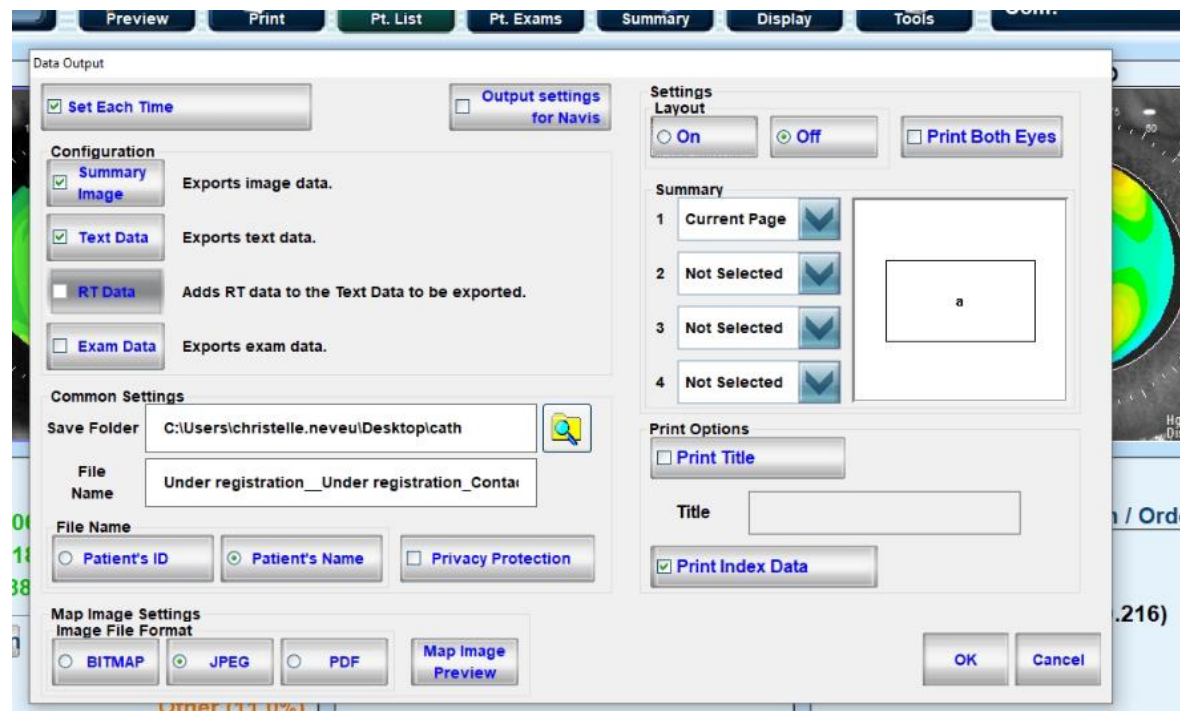


OPD Scan NIDEK


Sélectionner votre topographie
et l'ouvrir avec Overview
Cliquer sur TOOLS puis
OUTPUT CORNEAL DATA

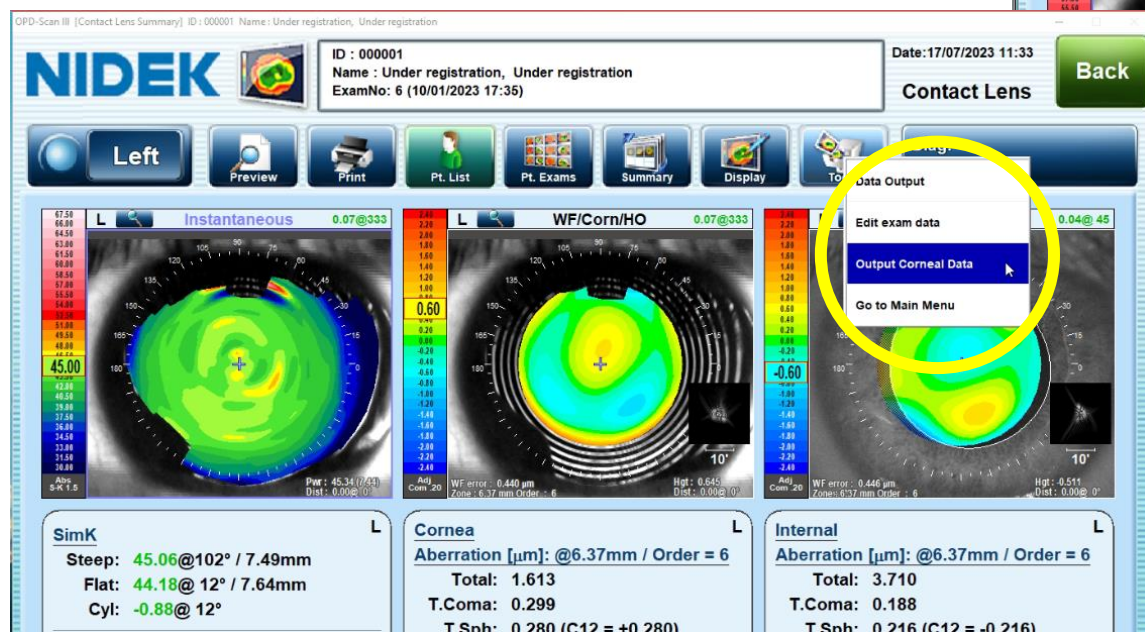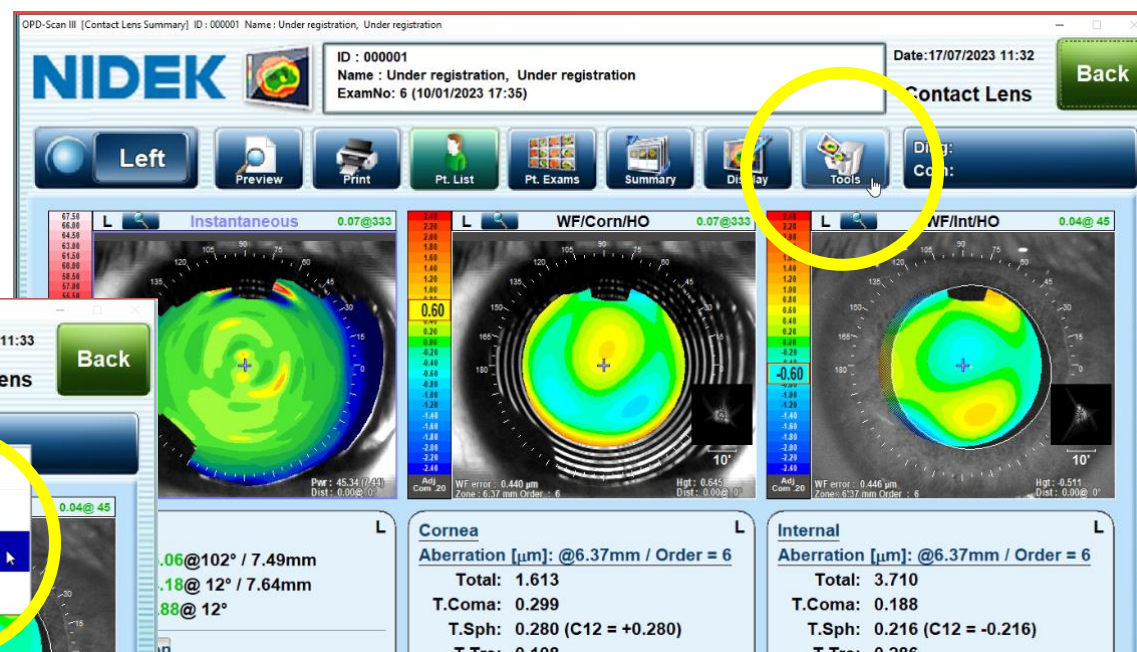

OPD Scan NIDEK

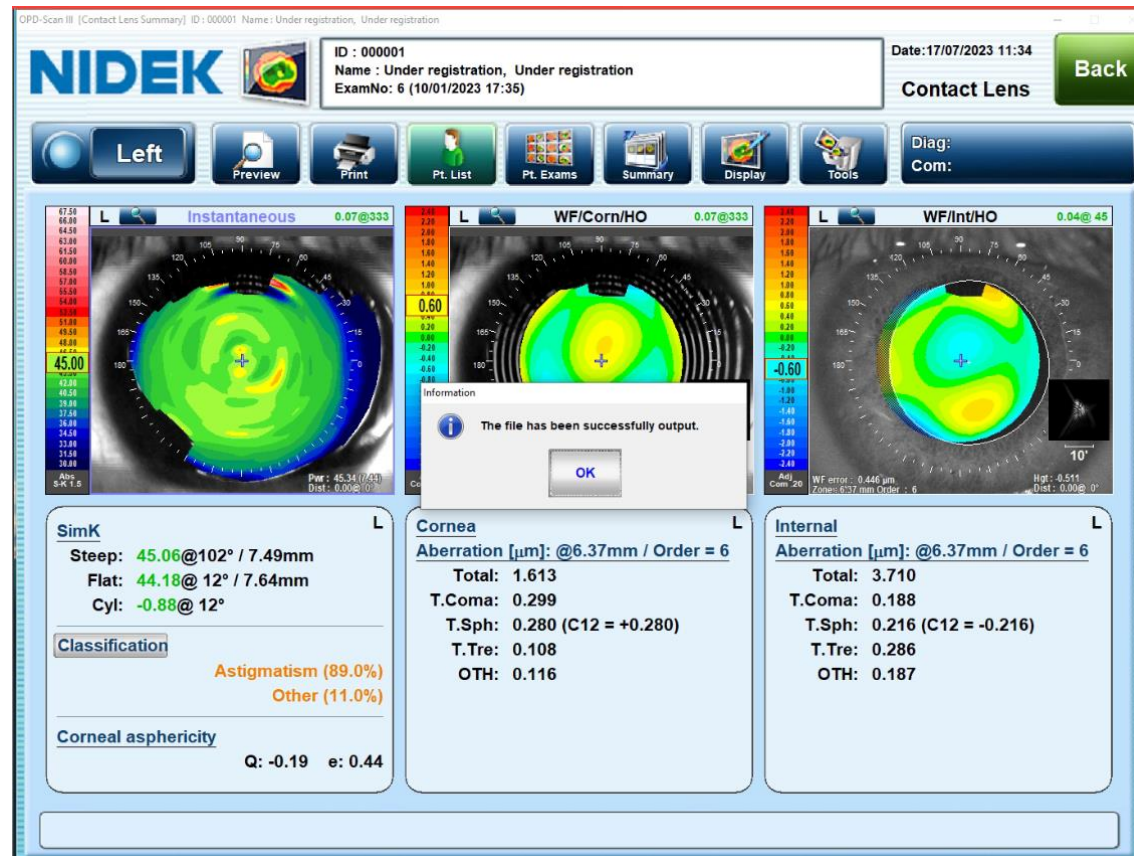

OPD Scan NIDEK

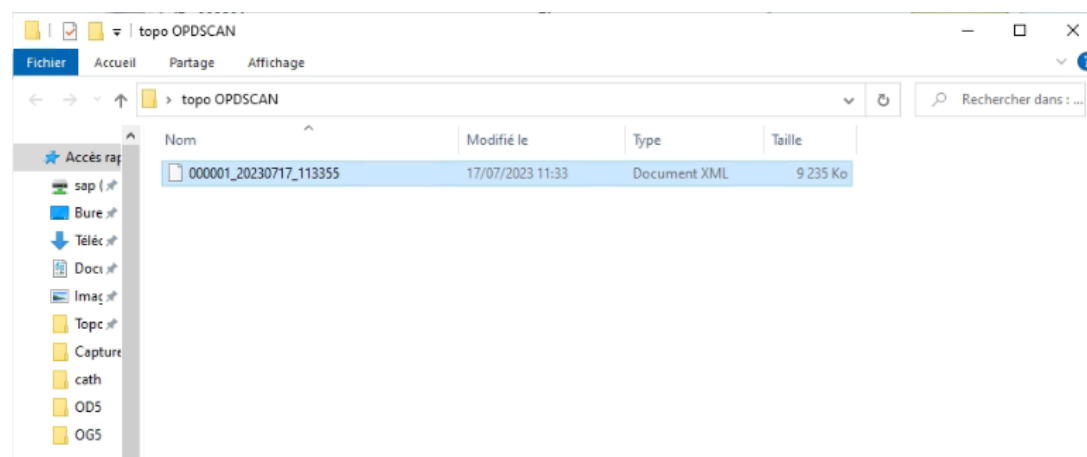

Kératométrie

Unité d'affichage

☒ Millimètres ☐ Dioptries

Modèle de topographe utilisé

-

K plat

Exc plat

Axe (f)

0,5

K serré

Exc serré

Div à 30°

0,5

K moyen : 0.00

Topographie



OPD Scan NIDEK

- Dans le dossier C&F du porteur, cliquer sur le symbole : 
- Glisser le fichier précédemment enregistré dans l'encadrement qui s'affiche et cliquer sur 
- Il s'agit du même fichier pour l'OD et l'OG

Importer une topographie pour l'Œil droit ×

Choix du topographe*

OPD-Scan ▼



Attention, dans le cas d'une cornée pathologique : Ne pas utiliser la fonction de nettoyage des données.



Nettoyer la topographie

Pour l'OPD-Scan, un fichier *.xml est attendu

Sélectionnez le(s) fichier(s)

ou glissez-déposez ici

Annuler

Importer 



Click.fit@precilens.com